

Veilig draaien op bed

Het RollAssist® wentelsysteem helpt bij het verplaatsen, draaien en kantelen op bed.



Verplaatsen



Draaien



Kantelen

Maakt de zorg minder zwaar



Rollassist®



Heeft u pijn of moeite met draaien op bed, door druk- of schuifkrachten, wonden of andere fysieke klachten? Is wissel- ligging belangrijk om het herstel te versnellen of klachten te verlichten? Dan is de RollAssist wellicht een uitkomst.



De RollAssist is een slim elektrisch wentelsysteem dat gemakkelijk is te bedienen. Het past op bijna ieder hooglaagbed en is snel te monteren. Aan weerskanten van het bed worden kleine kolommen geplaatst die voorzien worden van een ingenieus rolsysteem voor een wentellaken.


Mantelzorgers en verzorgenden kunnen u met de RollAssist gemakkelijk helpen bij het draaien en verschuiven op bed, zonder dat u pijnlijk glijdt of hoeft te worden opgetild.

De RollAssist doet het zware werk

Helpen bij het draaien en verplaatsen op bed, is met de RollAssist veel minder zwaar. De RollAssist doet het zware werk. U hoeft niet te worden vastgepakt, opgetild of verschoven. De RollAssist is eenvoudig te bedienen met de elektrische handbediening.



Ook het installeren van de RollAssist is simpel. Wanneer de kolommen met het wentelsysteem zijn gemonteerd, wordt het wentellaken op de rolbuis aan de ene kant van het bed vastgezet en uitgerold over het matras naar de rolbuis aan de andere kant van het bed.

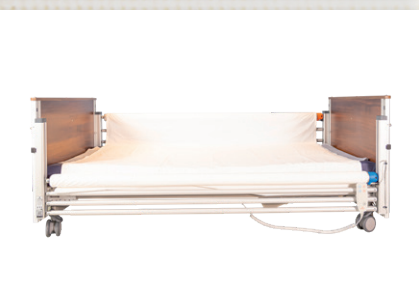

Door de combinatie van het systeem met een speciaal glijlaken voor het matras, draait en schuift u zonder veel weerstand en wrijvingswarmte op het bed. U voorkomt bewegingspijn, huid- en wond-irritatie die herstel in de weg staan of pijn en klachten kunnen verergeren.



De veiligheid voor de gebruiker is met de RollAssist tevens gewaarborgd. Want door de drie extra buizen onder de rolbuis kan de gebruiker niet uit bed rollen. Een veilig idee voor gebruiker en verzorgende.

Voordelen van de RollAssist

- Werkt preventief en genezend voor wonden en decubitus
- Zorgt voor een prettige en comfortabele ligpositie
- Voorkomt fysieke overbelasting van de verzorger
- Draagt bij aan een gezonde en veilige werkomgeving (arbo)
- Is een CE-gemarkeerd en gepatenteerd zorg hulpmiddel
- Is snel en eenvoudig te monteren (15-20 minuten)
- Past op bijna alle hooglaag bedden
- Is makkelijk wegklapbaar voor prettig in en uit bed
- Bevordert de wissel ligging naar links en rechts
- Elektrische handbediening
- Is in lengte, breedte en hoogte verstelbaar

Specificaties

- Kleur: Standaard grijs (aanpasbaar)
- Lengte verstelbaar (cm): 195 - 220
- Breedte verstelbaar (cm): 90 - 120
- Hoogte verstelbaar (cm): 7 - 38
- Gebruikersgewicht (kg): 40 - 200
- Totaal gewicht systeem (kg): 40
- Is standaard voorzien van een glijlaken en twee wentellaken



[specialbeds.nl](https://www.specialbeds.nl)

Specialbeds - Uw gids in speciale zorgbedden

De zorg voor en door mensen wordt steeds zwaarder. Onze speciale zorgbedden zijn makkelijk, prettig en veilig in gebruik. De gebruikers ervaren hierdoor meer ontspanning, meer zelfstandigheid en de zorg als minder zwaar.

Wij helpen u in 3 gemakkelijke stappen op weg.



1. Aanvraag



2. Probeer



3. Gebruik

Neem contact met ons op:
+31 341 350 593 | info@specialbeds.nl | www.specialbeds.nl

 specialbeds